



FUTURO™ VOCHTREGULERENDE KNEEBANDAGE

45694, 45696, 45697



Hoogwaardig design voor ondersteuning tijdens het bewegen.

IDEAAL VOOR:

Algemene steun, fietsen, tennissen, sporten

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Voorgevormde bandage met dubbel precisieriempje voor een perfecte pasvorm.
- 2 Open bij de knieschijf voor steun en comfort.
- Unieke mix van materialen voor een sterke ondersteuning, verzachtende warmte en comfort.

MAAT:



Referentie	CNK	Maat	CM
45694	2251700	S	33.0-38.1
45696	2251692	M	38.1-43.2
45697	2251684	L	43.2-48.3



GEURWEREND



ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Biedt steun voor stijve, zwakke knieën, of bij letsels.

LET OP: Sommige mensen zijn gevoelig voor neopreen of neopreen-rubbermengsels. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er uitslag ontstaat.

Samenstelling: Neopreenmix, Nylon, Polyester, Spandex.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

DRAAGINSTRUCTIES:



Open alle sluitingen en schuif de ondersteuning over de voet, te beginnen met de bredere kant. Positioneer de knieschijfkring over de knieschijf.



Zet de bovenste riem vast langs de bovenkant van de bandage.



Zet de onderste riem vast langs de onderrand van de bandage.

Trek beide riemen aan totdat deze strak maar comfortabel vastzitten.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

